

## Списък за проверки на налягането при прилагане на Tisseel или Artiss с изделие за регулиране на налягането

### Внимание:

При всички случаи на прилагане на газ под налягане съществува потенциален риск от въздушна или газова емболия, от разкъсване на тъкани или подаване на въздух или газ под налягане, които може да се окажат животозастрашаващи. Винаги вземайте мерки за обръщане на внимание на подобни рискове, като съблюдавате препоръчителното максималното разстояние и минимално налягане.

### Списък за проверка на Easyspray (за открита хирургия).

Всички отговори на въпросите трябва да бъдат ДА

- 1) Преди да приложите Artiss или Tisseel подсушихте ли повърхностната зона на раната със стандартни техники (например периодично приложение на компреси, тампони, използване на изделия за изсмукване)?
- 2) Показва ли измервателният уред на изделието Easyspray подходящия диапазон на налягането от 1,5-2,0 бара?
- 3) Можете ли точно да прецените разстоянието до спрея?
- 4) Приложихте ли като като спрей продукта от разстояние най-малко 10 см от повърхността на тъканта?

### Списък за проверка на Duplospray (лапароскопска/минимално инвазивна хирургия).

Всички отговори на въпросите трябва да бъдат ДА

- 1) Преди да приложите Tisseel подсушихте ли повърхностната зона на раната със стандартни техники (например периодично приложение на компреси, тампони, използване на изделия за изсмукване)?
- 2) Използвате ли CO<sub>2</sub> за прилагането като спрей?
- 3) Когато натиснете крачния превключвател на Duplospray, показва ли измервателният уред за дебита 1,0-2,0 литра в минута (L/min)?
- 4) Можете ли точно да прецените разстоянието до спрея?
- 5) Приложихте ли като като спрей продукта от разстояние най-малко 2 см от повърхността на тъканта?

ARTISS е само за подкожно приложение. ARTISS не се препоръчва за лапароскопска хирургия.