

## **Kontrolní seznam pro správný tlak a vzdálenost při aplikaci přípravků Tisseel/ Tisseel Lyo nebo Artiss pomocí tlakového regulátoru**

### Upozornění:

Jakákoli aplikace natlakovaného plynu může mít za následek nebezpečí vzniku vzduchové nebo plynové embolie, rupturu tkáně nebo zachycení vzduchu nebo plynu s kompresí, což může ohrozit život pacienta. Proveďte odpovídající opatření pro prevenci těchto rizik dodržováním minimální vzdálenosti sprejování a maximálního tlaku.

### Kontrolní seznam pro systém Easyspray (chirurgické zákroky v otevřené ráně)

Odpovědi na všechny otázky musí být ANO.

- 1) Osušili jste před aplikací přípravku Artiss nebo Tisseel/ Tisseel Lyo povrch rány standardním způsobem (např. aplikací intermitentní komprese, tampóny, použitím sacích zařízení)?
- 2) Ukazuje tlakoměr na zařízení Easyspray správné rozmezí tlaku 1,5–2,0 baru?
- 3) Můžete přesně posoudit vzdálenost aplikace spreje?
- 4) Provádíte sprejování přípravkem ve vzdálenosti minimálně 10 cm od povrchu tkáně?

### Kontrolní seznam pro systém Duplospray (laparoskopické/minimálně invazivní chirurgické zákroky)

Odpovědi na všechny otázky musí být ANO.

- 1) Osušili jste před aplikací přípravku Tisseel/ Tisseel Lyo povrch rány standardním způsobem (např. aplikací intermitentní komprese, tampóny, použitím sacích zařízení)?
- 2) Používáte ke sprejování CO<sub>2</sub>?
- 3) Ukazuje průtokoměr po stisknutí nožního spínače systému Duplospray průtok 1,0–2,0 litry za minutu (l/min)?
- 4) Můžete přesně posoudit vzdálenost aplikace spreje?
- 5) Provádíte sprejování přípravkem ve vzdálenosti minimálně 2 cm od povrchu tkáně?

Přípravek ARTISS je určen pouze pro subkutánní podání. Přípravek ARTISS se nedoporučuje používat při laparoskopických zákrocích.