

Oikean paineen ja etäisyyden tarkistusluettelot käytettäessä Tisseel- tai Artiss-valmistetta ja paineensäätölaitetta

Varoitus:

Paineilman käyttö voi aiheuttaa ilma- tai kaasuembolian, kudoksen repeämisen tai ilmataskun aiheuttamaa kudospainetta, mikä voi olla hengenvaarallista. Voit estää nämä vaaratilanteet noudattamalla ruiskutukseen suositeltua vähimmäisetäisyyttä ja enimmäispainetta.

EasySpray-tarkistusluettelo (avoleikkauksiin)

Kaikkien kysymysten vastausten pitäisi olla KYLLÄ.

- 1) Oletko kuivannut haavan pinnan vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita) ennen Artiss- tai Tisseel-valmisteen lisäämistä?
- 2) Näyttääkö EasySpray säätölaitteen mittari asianmukaista painealuetta (1,5–2,0 baaria)?
- 3) Pystytkö määrittämään ruiskutusetaisyyden tarkasti?
- 4) Ruiskutatko tuotetta vähintään 10 cm:n etäisyydeltä kudoksen pinnasta?

DuploSpray-tarkistusluettelo (laparoskooppiset / minimaalisesti invasiiviset toimenpiteet)

Kaikkien kysymysten vastausten pitäisi olla KYLLÄ.

- 1) Oletko kuivannut haavan pinnan vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita) ennen Tisseel-valmisteen lisäämistä?
- 2) Käytätkö ruiskutukseen CO₂-kaasua?
- 3) Kun DuploSpray-poljinta painetaan, näyttääkö virtausmittari virtausnopeutta 1,0–2,0 litraa minuutissa (l/min)?
- 4) Pystytkö määrittämään ruiskutusetaisyyden tarkasti?
- 5) Ruiskutatko tuotetta vähintään 2 cm:n etäisyydeltä kudoksen pinnasta?

ARTISS-valmistetta suositellaan vain ihonalaiseen käyttöön. ARTISS-valmistetta ei suositella laparoskooppisiin leikkauksiin.