

**Κατάλογοι ελέγχου της σωστής πίεσης και απόστασης κατά την εφαρμογή του Tisseel με χρήση συσκευής ρύθμισης πίεσης**

**Προσοχή:**

**Κάθε εφαρμογή αερίου υπό πίεση μπορεί να συνδέεται με ενδεχόμενο κίνδυνο εμβολής από αέρα ή αέριο, ρήξης ιστών ή παγίδευσης αέρα ή αερίου με συμπίεση, καταστάσεις που ενδέχεται να είναι απειλητικές για τη ζωή. Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, τηρώντας τη συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση ψεκασμού και τη μέγιστη πίεση.**

Κατάλογος ελέγχου για το Easyspray (χειρουργική ανοικτών τραυμάτων).

Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ΝΑΙ

- 1) Πριν από την εφαρμογή του Tisseel, στεγνώσατε την επιφάνεια του τραύματος με τις συνήθεις τεχνικές (π.χ. διακοπτόμενη εφαρμογή κομπρεσών, τολύπια, χρήση συσκευών αναρρόφησης);
- 2) Ο μετρητής της συσκευής Easyspray δείχνει τη σωστή κλίμακα πίεσης των 1,5-2,0 bar;
- 3) Είστε σε θέση να υπολογίσετε με ακρίβεια την απόσταση ψεκασμού;
- 4) Ψεκάσατε το προϊόν από απόσταση τουλάχιστον 10 cm από την επιφάνεια του ιστού;

Κατάλογος ελέγχου για το Duplospray (λαπαροσκοπικές/ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες).

Οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ΝΑΙ

- 1) Πριν από την εφαρμογή του Tisseel, στεγνώσατε την επιφάνεια του τραύματος με τις συνήθεις τεχνικές (π.χ. διακοπτόμενη εφαρμογή κομπρεσών, τολύπια, χρήση συσκευών αναρρόφησης);
- 2) Χρησιμοποιείτε CO<sub>2</sub> για τον ψεκασμό;
- 3) Όταν πατάτε τον ποδοδιακόπτη του Duplospray, ο μετρητής ροής δείχνει ρυθμό ροής 1,0-2,0 λίτρων ανά λεπτό (L/min);
- 4) Είστε σε θέση να υπολογίσετε με ακρίβεια την απόσταση ψεκασμού;
- 5) Ψεκάσατε το προϊόν από απόσταση τουλάχιστον 2 cm από την επιφάνεια του ιστού;