

## **Ellenőrzőlista a helyes nyomásra és távolságra vonatkozóan a Tisseel/Tissucol, illetve Artiss ragasztó nyomásszabályozós készülékkel történő alkalmazásához**

Figyelmeztetés:

Bármilyen nagynyomású gáz alkalmazásához légembólia, szövetroptura vagy kompressziót kiváltó levegő vagy gáz bennrekedés potenciális veszélye társulhat, ami életveszélyes lehet. Tegyen megfelelő intézkedéseket ezen kockázatok kiküszöbölése érdekében a javasolt minimális permetezési távolság és maximális nyomás betartásával.

Ellenőrzőlista az Easyspray alkalmazásához (nyílt műtéthez)

Minden egyes kérdésre IGEN-nek kell lennie a válasznak.

- 1.) Az Artiss, illetve Tisseel/Tissucol alkalmazása előtt megszáritotta a seb felületét standard technikák (pl. átmeneti kötözés, vattapamacsok, szívóeszközök) segítségével?
- 2.) Az Easyspray készüléken lévő mérőműszer megfelelő nyomástartományt (1,5–2,0 bar) mutat?
- 3.) Képes Ön pontosan megítélni a permetezési távolságot?
- 4.) A terméket a szövetfelszíntől legalább 10 cm távolságból permetezi?

Ellenőrzőlista a Duplospray alkalmazásához (laparoszkópos/minimálisan invazív eljárások)

Minden egyes kérdésre IGEN-nek kell lennie a válasznak.

- 1.) A Tisseel/Tissucol alkalmazása előtt megszáritotta a seb felületét standard technikák (pl. átmeneti kötözés, vattapamacsok, szívóeszközök) segítségével?
- 2.) CO<sub>2</sub> gázt használ a permetezéshez?
- 3.) A Duplospray pedáljának lenyomásakor az áramlásmérő 1,0–2,0 liter/perc (L/min) áramlási sebességet jelez?
- 4.) Képes Ön pontosan megítélni a permetezési távolságot?
- 5.) A terméket a szövetfelszíntől legalább 2 cm távolságból permetezi?

Az ARTISS kizárólag subcutan alkalmazásra szolgál. Az ARTISS nem javallott laparoszkópos alkalmazásra.