

**Checklist voor de juiste drukwaarde en afstand bij het aanbrengen van  
TISSUCOL DUO 500, TISSUCOL KIT, TISSEEL of ARTISS met een drukregelaar**

Let op:

Het gebruik van persgas kan gepaard gaan met een mogelijk risico op lucht- of gasembolie, ruptuur van weefsels of ingesloten lucht- of gasbellen met compressie, wat levensgevaarlijk kan zijn. Passende maatregelen moeten worden genomen om deze risico's te vermijden, door bijvoorbeeld de aanbevolen minimale sprayafstand en aanbevolen maximale drukwaarde in acht te nemen.

**Checklist voor EASYSPRAY (open-wondchirurgie)**

Alle vragen moeten worden beantwoord met **JA**

	JA	NEEN
1) Hebt u voor het aanbrengen van Tissucol Duo 500, Tissucol Kit, Tisseel of Artiss het oppervlak van de wond met standaardtechnieken gedroogd (zoals afwisselend aanbrengen van kompressen, wattenstaafjes, gebruik van een zuigapparaat)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Wijst de meter op de Easyspray het juiste drukbereik van 1,5 - 2,0 bar aan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Kunt u de sprayafstand nauwkeurig bepalen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Verstuift u het product met een sprayafstand van minimaal 10 cm vanaf het weefseloppervlak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Checklist voor DUPLOSPRAY (laparoscopische/minimaal invasieve chirurgie)**

Alle vragen moeten worden beantwoord met **JA**

	JA	NEEN
1) Hebt u voor het aanbrengen van Tissucol Duo 500, Tissucol Kit of Tisseel het oppervlak van de wond met standaardtechnieken gedroogd (zoals afwisselend aanbrengen van kompressen, wattenstaafjes, gebruik van een zuigapparaat)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Gebruikt u CO <sub>2</sub> voor het verstuiven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Wanneer u het voetpedaal van Duplospray indrukt, geeft de gasstroommeter een stroomsnelheid van 1,0 - 2,0 liter per minuut (l/min) aan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Kunt u de sprayafstand nauwkeurig bepalen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Verstuift u het product met een sprayafstand van minimaal 2 cm vanaf het weefseloppervlak?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ARTISS is uitsluitend voor subcutaan gebruik. ARTISS wordt niet aanbevolen voor laparoscopische chirurgie.