

## **Sjekkliste for korrekt trykk og avstand ved påføring av Tisseel eller Artiss ved bruk av en trykkregulatorenhet**

Forsiktig:

Enhver bruk av gass under trykk kan knyttes til en mulig risiko for luft- eller gassembolisme, vevsskade eller innestengt komprimert luft eller gass som kan være livstruende. Pass på å treffe passende tiltak for å ta hensyn disse risikoene ved å overholde den anbefalte minste sprayeavstanden og det maksimale trykket.

Sjekkliste for Easyspray (åpen sårkirurgi).

Alle svar på spørsmålene skal være JA

- 1) Har du tørket såroverflaten med standard teknikker (f.eks. periodisk påføring av kompresser, vattpinner, bruk av sugeapparater) før påføring av Artiss eller Tisseel?
- 2) Viser måleren på Easyspray-enheten det riktige trykkområdet på 1,5–2,0 bar?
- 3) Kan du bedømme sprayeavstanden nøyaktig?
- 4) Sprayer du produktet med en avstand på minst 10 cm fra vevsoverflaten?

Sjekkliste for Duplospray (laparoskopisk / minimalt invasiv kirurgi).

Alle svar på spørsmålene skal være JA

- 1) Har du tørket såroverflaten med standard teknikker (f.eks. periodisk påføring av kompresser, vattpinner, bruk av sugeapparater) før påføring av Tisseel?
- 2) Bruker du CO<sub>2</sub> til spraying?
- 3) Indikerer gjennomstrømningsmåleren en gjennomstrømningshastighet på 1,0–2,0 liter per minutt (l/min) når fotbryteren til Duplospray trykkes ned?
- 4) Kan du bedømme sprayeavstanden nøyaktig?
- 5) Sprayer du produktet med en avstand på minst 2 cm fra vevsoverflaten?

ARTISS er kun for subkutan bruk. ARTISS er ikke anbefalt for laparoskopisk kirurgi.