

Checklista för korrekt tryck och avstånd vid applicering av Tisseel eller Artiss med en tryckregulator

Observera:

All applicering av trycksatt gas kan vara förenad med en potentiell risk för luft- eller gasembolism, vävnadsruptur eller inneslutning av luft eller gas under tryck, vilket kan vara livshotande. Var noga med att vidta lämpliga åtgärder för att undvika dessa risker genom att iaktta rekommenderat minsta sprayavstånd och högsta tryck.

Checklista för Easyspray (öppen kirurgi).

Svaren på samtliga frågor ska vara JA

- 1) Innan Artiss eller Tisseel appliceras, har du torkat sårets ytområde med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar)?
- 2) Visar mätaren på Easyspray lämpligt tryckområde, 1,5-2,0 bar?
- 3) Kan du bedöma sprayavståndet ordentligt?
- 4) Sprayar du produkten på ett avstånd om minst 10 cm från vävnadsytan?

Checklista för Duplospray (laparoskopisk/minimalt invasiv kirurgi).

Svaren på samtliga frågor ska vara JA

- 1) Innan Tisseel appliceras, har du torkat sårets ytområde med standardteknik (t.ex. upprepad applicering av kompresser eller bomullspinnar, eller med hjälp av suganordningar)?
- 2) Använder du CO₂ vid sprayningen?
- 3) När du trycker ned fotpedalen på Duplospray, visar flödesmätaren en flödes hastighet på 1,0-2,0 liter per minut (L/min)?
- 4) Kan du bedöma sprayavståndet ordentligt?
- 5) Sprayar du produkten på ett avstånd om minst 2 cm från vävnadsytan?

ARTISS är endast avsett för subkutant bruk. ARTISS rekommenderas inte för laparoskopisk kirurgi.